

Rychlé operační postupy pro přístroj Finecare FIA Meter

Operační postup módu „Standard test“

Testovací mód 1 - Standardní test



1. Před stisknutím spínače napájení, posuňte přepínač na boční straně do polohy „MAC“ Pak stiskněte spínač napájení a automaticky se spustí operační systém přístroje



2. Klikněte na „Standard test“ v systémovém menu. Po úspěšné autodiagnostice se zobrazí hlášení „Please insert the ID Chip and click „Out“



3. Vezměte ID Chip z testovacího kitu, vsuňte jej do patřičného otvoru a pak klikněte na „Out“. Objeví se systémové hlášení „Please insert the Test Card and Click „Test“ to start




4. Připravte vzorek krve (například pro CRP je to 8,5 ul plné krve, nebo 5 ul plazmy/séra. Přidejte k pufru a roztřeptejte.



5. Vyndejte testovací kazetu z obalu, 75 ul rozmíchaného vzorku s pufrům aplikujte do k tomu určeného místa v kazetě. Ihned pak vložte testovací kazetu do držáku v přístroji a klikněte na „Test“



6. Přístroj začne odpočítávat čas (od 3 do 15 minut v závislosti na typu testu) Když se zobrazí hášení „Please insert the test card“ zasuňte kazetu do držáku.

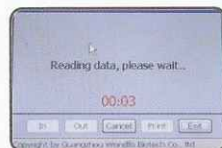

7. Když skončí odpočítávání na 0:00, přístroj začne analyzovat a zobrazí výsledek.



8. Klikněte na „Print“ pro tisk výsledku


Rychlé operační postupy pro přístroj Finecare FIA Meter

Operační postup módu „Quick Test“

Testovací mód 2 - Quick Test



1. Před stisknutím spínače napájení, posuňte přepínač na boční straně do polohy „MAC“ Pak stisknete spínač napájení a automaticky se spustí operační systém přístroje

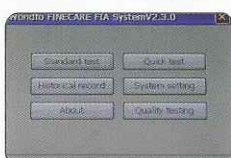

2. Klikněte na „Quick test“ v systémovém menu. Po úspěšné autodiagnostice se zobrazí hlášení „Please insert the ID Chip and click „Out“



3. Vezměte ID Chip z testovacího kitu, vsuňte jej do patřičného otvoru.



4. Klikněte na „Out“ a držák testovací kazety se vysune.



5. Připravte vzorek krve (například pro CRP je to 8,5 ul plné krve, nebo 5 ul plazmy/séra. Přidejte k pufru a roztřepejte.



6. Vyndejte testovací kazetu z obalu, 75 ul rozmíchaného vzorku s puftrem aplikujte do k tomu určeného místa v kazetě. Při pokojové teplotě umístěte kazetu, nebo kazety do samostatného držáku s časovači a nastavte odpočet (doba záleží na druhu použitého testu)



7. Po uplynutí požadovaného času vložte kazetu do držáku v zařízení.



8. Klikněte na „Test“ a přístroj začne s měřením a na displeji se zobrazí výsledek



. Klikněte na „Print“ pro tisk výsledku